

MÁY PHUN KHÍ DUNG CƠ CHẾ SIÊU ÂM OMRON



1. Thông số kỹ thuật:

- Nhà sản xuất: Omron – Nhật Bản
- Model: NE-U17
- Nguồn điện: 230VAC, 50Hz
- Công suất tiêu thụ: ~ 80VA
- Cầu chì T2A L250V
- Tần số siêu âm: ~1,7 Hz
- Chỉ số phun: Khoảng 0 tới 3ml / phút, có thể điều chỉnh
- Kích thước hạt: 4,4 μ m MMAD
- Lượng khí: Tối đa 17 l/phút
- Lượng nước ngưng: ~ 375 ml
- Dung lượng cốc thuốc: ~ 150 ml (tối thiểu 5 ml)
- Kích thước bên ngoài: 276 x 243 x 226 mm
- Trọng lượng: 4 kg
- Điều kiện hoạt động: 5°C tới 40°C

2. Chức năng

- Là máy xông khí, xông mũi họng
- Xông thuốc ở dạng bụi thuốc

3. Cách vận hành

- a. Chuẩn bị trước khi xông:
 - Các bộ phận có thể được tẩy trùng bằng cách luộc
 - + Nắp cốc thuốc
 - + Vòng đệm

- + Ống xông có đầu nối
- Các bộ phận không được tẩy trùng bằng cách luộc
 - + Ống ngậm
 - + Cốc thuốc
 - + Quạt, nắp quạt
 - + Vỏ bộ lọc khí, bộ lọc khí
 - + Bộ giữ cốc thuốc
- b. Cách xông
 - Đặt thời gian xông: Đặt bộ định giờ hoặc xông liên tục
 - Ấn phím START/STOP
 - Xông thuốc: Có thể dùng mặt nạ xông hoặc ống ngậm
 - Kết thúc quá trình xông: Ấn phím START/TOP một lần nữa.

Lưu ý:

- *Trong trường hợp việc điều trị bị ngừng do ấn nút START/STOP, phải đặt lại thời gian con lại trước khi điều trị tiếp*
- *Trong quá trình sử dụng, không gập ống hoặc bịt đầu ống*
- *Không sử dụng máy nếu máy để cao hơn đầu.*