

# MÁY HÚT DỊCH CÓ XE ĐẨY



## 1. Thông số kỹ thuật

- Model : 1242
- Hãng sản xuất : Thomas – Mỹ

## 2. Chức năng

- Hút dịch

## 3. Cách vận hành

- Lắp các bình chứa vào hệ thống hút hoàn chỉnh
- Cấp nguồn xoay chiều 220V AC, 50Hz
- Chọn chế độ hút liên tục hoặc hút ngắt quãng theo yêu cầu như sau :

- Bật công tắc nguồn sáng vị trí ON để hút liên tục
  - Bật công tắc nguồn sáng sang vị trí PEDAL để hút ngắt quãng theo yêu cầu khi đạp Pedal
- d. Điều chỉnh áp lực hút theo yêu cầu của bác sĩ chuyên khoa bằng núm điều chỉnh áp lực
- e. Đưa đầu hút của ống dẫn vào chất dịch cần hút, việc hút bắt đầu
- f. Nếu chọn chế độ hút ngắt quãng theo yêu cầu , tích cực hút bằng Pedal đạp chân
- g. Khi kết thúc, tắt công tắc nguồn , khi đó công tắc nguồn ở vị trí chính giữa ( vị trí OFF ) và tiệt trùng ống hút để dùng cho lần sau

**Lưu ý :**

- *Khi máy không sử dụng trong thời gian dài nên thử một vài lần trước khi tiến hành trên bệnh nhân*
- *Khi chai chứa thứ 2 được nửa bình thì nên đổ chất dịch để an toàn và vệ sinh bình chứa*